

Fenistil® Wundheilgel

Wundbehandlung

Zur vielseitigen Wundbehandlung

Zweckbestimmung

Fenistil Wundheilgel ist ein hydroaktives Kolloidgel zur Wundbehandlung, das die Heilung der Haut unterstützt, indem es sich über die Wunde legt und die Wundfeuchtigkeit reguliert und somit ein optimales feuchtes Umfeld für die Wundheilung generiert. Fenistil Wundheilgel ist für die Behandlung von leichten Verbrennungen und Wunden (z. B. Abschürfungen, Schnittwunden) vorgesehen. Fenistil Wundheilgel kann sowohl bei offenen Wunden (ohne tiefergehende Gewebeschädigungen) als auch bei oberflächlichem Dekubitus (hier nur unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal) verwendet werden.

Eigenschaften

Fenistil Wundheilgel enthält ein Hydrokolloid (pH = 5,5), das die Schaffung eines optimalen feuchten Umfelds für die Wundheilung unterstützt, die Zellerneuerung beschleunigt und somit die Wahrscheinlichkeit von Narbenbildung verringert. Außerdem lindert Fenistil Wundheilgel aufgrund seiner kühlenden Wirkung rasch den Schmerz. Fenistil Wundheilgel ist sowohl für trockene als auch für nässende Wunden geeignet:

- Durch Fenistil Wundheilgel wird eine trockene Wunde befeuchtet ("Hydrogel"-Effekt). Eine trockene Wunde nimmt die in Fenistil Wundheilgel enthaltene Feuchtigkeit auf, was die Beseitigung von abgestorbenem und geschädigtem Gewebe fördert.
- Im Falle einer nässenden Wunde wird das Hydrokolloid in Fenistil Wundheilgel aktiviert, so kann Fenistil Wundheilgel die überschüssige Flüssigkeit aus der Wunde aufnehmen und das Gleichgewicht des Wasserhaushalts in der Wunde wieder herstellen ("Hydrokolloid"-Effekt).

Hinweise zur Anwendung

Tragen Sie das Gel nicht bei stark nässenden oder infizierten Wunden an, es sei denn, dies wurde von Ihrem Arzt empfohlen. Waschen Sie sich vor und nach der Behandlung einer Wunde die Hände. Säubern und trocknen Sie die Wunde vor dem Auftragen des Gels vorsichtig.

Bei leichten Verbrennungen und Wunden (z. B. Abschürfungen, Schnittwunden):

Tragen Sie Fenistil Wundheilgel vorsichtig (ohne zu reiben) ein- oder zweimal täglich (bei Sonnenbrand zwei- bis sechsmal täglich) auf die Wunde auf.

Decken Sie die Wunde, wenn nötig, mit einem Pflaster oder Verband ab und wechseln Sie dieses/diesen täglich.

Bei offenen Wunden (ohne tiefergehende Gewebeschädigungen) und oberflächlichem Dekubitus (hier nur unter medizinischer Aufsicht):

Tragen Sie eine dicke Schicht Fenistil Wundheilgel (5 mm) auf die Wunde auf; sparen Sie dabei, wenn möglich, die Wundränder aus. Decken Sie Fenistil Wundheilgel mit einem sterilen, nicht klebenden Verband ab und fixieren Sie diesen mit Gaze oder einer Bandage. Lassen Sie Fenistil Wundheilgel auf der Wunde, so lange die Gelstruktur intakt ist.

- Bei offenen Wunden: täglich erneuern
- Oberflächlicher Dekubitus: alle 1 bis 2 Tage erneuern

Wichtiger Hinweis:

Sobald sich neue Hautzellen bilden und die Wunde sich schließt, sollten Sie für eine bessere Heilung nur noch eine dünne Schicht Fenistil Wundheilgel auftragen. Schützen Sie die Wundränder falls erforderlich.




Säubern



Trocknen



Auftragen

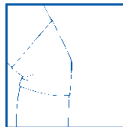

Abdecken

Abnahme des Wundheilgels:

- Waschen Sie sich vor und nach der Entfernung von Fenistil Wundheilgel die Hände.
- Fenistil Wundheilgel kann einfach und schmerzlos mit feuchter Gaze entfernt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Zur äußerlichen Anwendung.
- Nebenwirkungen wie etwa Reizungen oder allergische Reaktionen treten selten auf.
- Fenistil Wundheilgel nicht anwenden bei einer bekannten Allergie gegen Parabene oder einem anderen Bestandteil von Fenistil Wundheilgel.
- Wenden Sie Fenistil Wundheilgel nicht auf den Augenlidern oder in den Augen an. Falls Fenistil Wundheilgel mit den Augen in Kontakt kommt, sollten Sie die Augen mit fließendem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei sehr großen, stark nässenden oder infizierten Wunden sollten Sie vor der Anwendung von Fenistil Wundheilgel einen Arzt aufsuchen, da möglicherweise eine zusätzliche Behandlung erforderlich ist.
- Falls die Wunde anschwillt, sich rötet oder schmerzt oder falls die Wundheilung im Laufe einiger Tage nicht einsetzt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- Falls Sie schwanger sind oder stillen, sollten Sie Fenistil Wundheilgel nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

Hinweis zur Aufbewahrung

- Lagern Sie das Gel bei Zimmertemperatur (< 25 °C) an einem trockenen Ort und in der Original-Verpackung.
- Schließen Sie die Tube nach der Anwendung.
- Verwenden Sie Fenistil Wundheilgel nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfallsdatums.

Bestandteile

Saures kolloidales Hydrokolloid; Arginin; gereinigtes Wasser; verzweigt-kettige Fettsäure (BCFA); Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218); Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216).

Packungsgrößen

Tube zu 10 g, 50 g und 250 g.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Hersteller

Novartis Consumer Health SA
Route de l'Etraz
CH-1260 Nyon/Schweiz

Lizenzgeber

Flen Pharma NV

Vertrieb

Novartis Consumer Health GmbH

✉ 81366 München/Deutschland

🏠 Zielstattstraße 40, 81379 München/Deutschland

☎ Telefon +49 (89) 78 77-0

☎ Telefax +49 (89) 78 77-444

CE 0459 Medizinprodukt

P 111 596 A 50-1

DE 903723

 **NOVARTIS**